



NR - Pentru utilizare într-un singur schimb
- Maxim 8 ore de utilizare

Pentru utilizare împotriva aerosolilor lichizi și solizi
Vezi informațiile oferite de producător

20

Măști de particule

EN 149:2001+A1:2009
FFP2 NR

Declarația de conformitate UE pe website-ul: www.makrite.com Regulamentul (UE) 2016/425 PPE

ATENȚIONĂRI Înainte de utilizare citiți și înțelegeți

1. O mască selectată în mod corespunzător este esențială pentru a vă proteja sănătatea. Înainte de a utiliza acest produs consultați un specialist în domeniul protecției muncii pentru a determina dacă este adecvat pentru aplicația dorită.
2. Ca în cazul oricărui dispozitiv respirator, utilizatorul trebuie instruit în mod corespunzător înainte de utilizare. Întotdeauna, înainte de folosire, utilizatorul trebuie să verifice dacă masca este într-o stare bună - fără murdărie, fără deteriorări ale sistemului de prindere pe cap etc.
3. Acest produs nu protejează utilizatorul împotriva gazelor, vaporilor sau a aburilor a căror lichide produc vapori sau gaze dăunătoare.
4. Nu folosiți în operațiuni de sablare.
5. Acest produs nu este alimentat cu oxigen. Folosiți această mască doar în zone ventilate bine, care conțin suficient oxigen (cel puțin 19,5%) pentru a susține viața.
6. Nu folosiți atunci când contaminatorii și concentrația acestora sunt necunoscute sau periculoase pentru viață și sănătate.
7. Părăsiți imediat zona de lucru dacă: a) Respirația devine dificilă; b) apar amețeli sau alte tulburări; c) masca se deteriorează sau d) apare o urgență.
8. Dacă utilizatorul are o boală sau o tulburare, consultați un medic autorizat pentru determina dacă produsul este adecvat pentru utilizare.
9. Părul facial și alte caracteristici faciale vor împiedica utilizarea eficientă a acestui produs.
10. Înlocuiți masca atunci când respirația devine greoaie datorită încărcării cu praf, după o utilizare continuă de maxim 8 ore - „a se folosi doar un singur schimb”
11. Nerespectarea tuturor avertismentelor și a instrucțiunilor privind utilizarea acestui produs poate duce la boli grave sau afecțiuni permanente.
12. Echipamentul nu ar trebui să acționeze la o sursă de aprindere și nu ar trebui să fie utilizat în atmosfere explozibile, deoarece concentrația contaminatorului în intervalul normal de inflamabilitate ar depăși limitele din ghidul de selecție.
13. Când nu este utilizată, masca trebuie depozitată într-un recipient sigilat, ferită de zonele contaminate.
14. În timpul transportului păstrați masca în ambalajul original.
15. Înainte de a intra în mediul de lucru, asigurați-vă că masca se potrivește bine.

GARANȚIE LIMITATĂ Notă importantă pentru achizitor

Această garanție limitată este efectuată în locul garanțiilor comerciale, potrivite pentru anumite scopuri și pentru alte garanții explicite sau implicite. Nu există alte garanții care se extind dincolo de prezenta descriere. Standardele și specificațiile fizice ale Makrite vor fi îndeplinite de produsele vândute.

Căi de atac exclusive: daunele pentru încălcarea acestei garanții limitate se rezumă la înlocuirea acelei cantități de produse Makrite care s-au dovedit a fi fabricate în mod defectuos. Cu excepția celor prevăzute mai sus, Makrite nu va fi răspunzător sau responsabil pentru nici o pierdere, pagubă sau obligație directă, indirectă, incidentală, specială sau de consecință care rezultă din vânzare, utilizare, întrebuințare defectuoasă sau din incapacitatea utilizatorului de a folosi produsul



Vezi informațiile înainte de utilizare



Temp. de depozitare



< 75%RH

Umiditatea cond. depozitare



Limitarea timpului de utilizare

1. Nu folosiți aceeași mască mai mult de 8 ore, în mod continuu sau intermitent, în locuri de muncă murdare care ar putea duce la o încărcare ridicată a filtrului.
2. Părăsiți zona contaminată și îndepărtați masca, dacă respirația devine dificilă sau dacă nu reușiți să potriviți masca sau aceasta este deteriorată, murdărită sau deformată. Nu utilizați aceeași mască după ce a fost îndepărtată.

Mască de particule

Masca de filtrare este concepută pentru aplicații care implică praf și fibre netoxice fine. Această mască îndeplinește cerințele EN 149 (FFP2 NR) și trebuie purtată pentru a proteja utilizatorul numai de aerosoli solizi și pe bază de apă. Masca poate fi utilizată în concentrații de contaminare de până la 10 ori mai mari decât Limitele de Expunere Ocupațională (OEL).

INSTRUCȚIUNI PENTRU FIXAREA MĂȘTII



PASUL 1

Țineți masca în mână cu bareta nazală la vârful degetelor permițând benzilor elastice să atârne liber sub mână



PASUL 2

Apăsați ferm masca pe fața dumneavoastră cu bareta nazală pe puntea nasului.



PASUL 3

Întindeți și poziționați banda elastică superioară în partea de sus din spatele capului. Întindeți banda elastică inferioară peste cap și poziționați-o sub urechi.



PASUL 4

Folosind ambele mâini modelați bareta nazală a măștii, după forma nasului dumneavoastră.



PASUL 5

Pentru a testa fixarea măștii: a) Împreunați ambele mâini deasupra măștii având grijă să nu-i deranjați poziția și b) inspirați puternic. Dacă există scurgeri de aer în jurul marginilor, re poziționați benzile elastice sau ajustați tensiunea acestora pentru a se potrivi mai bine. Dacă încă există scurgeri vizibile, atunci s-ar putea ca această mască să nu vi se potrivească, caz în care vă recomandăm să căutați un alt model din gama noastră.

Atenție: Înainte de fiecare purtare, verificați dacă masca s-a fixat bine.

Fabricat în China de: Makrite Industries Inc
Adresa: 11F-5, Nr. 79, Sec. 1, Xintai 5th Road., XiZhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan, R.O.C.
Examinare tip (Modul B) de către: BSI Group Olanda B.V. (ON 2797) Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP, Amsterdam, Olanda
Conformitate tip (Modul D) de către: BSI Group Olanda B.V. (ON 2797) Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP, Amsterdam, Olanda

IMPORTATOR:

RENANIA TRADE SRL, str. Budiului nr. 68, 540390 TRAGU MURES, ROMANIA
www.renania.ro