


SPECIFICAȚIE TEHNICĂ

Cartuș PAD PAK adult / pediatric

Producător: Heartsine Technologies Irlanda de Nord, parte a grupului Stryker

Cod produs: PAD-PAK-03 adult, PAD-PAK-04 pediatric

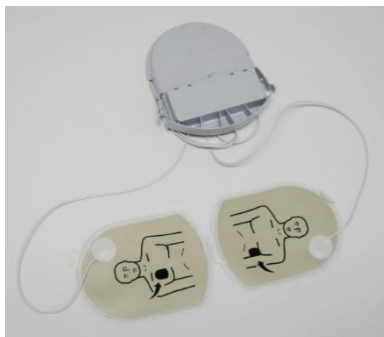

Cartușul PAD-PAK este un consumabil al defibrilatoarelor semiautomate PAD300 / PAD350 / PAD500 P. Acesta este un ansamblu unitar de consumabile necesare unui singur pacient și conține bateria și electrozii, care sunt atașați la baterie.

Cartușul pentru adulți are culoare gri și se folosește la pacienții cu vârsta peste 8 ani sau greutate peste 25 kg iar cartușul pediatric are culoare roz și se folosește la pacienții cu vârsta sub 8 ani sau greutate sub 25 kg. Cartușul pediatric nu trebuie folosit la pacienți cu vârsta sub 1 an.

Caracteristici tehnice:

Baterie

Tip: Dioxid de Litiu Mangan (LiMnO₂), 18V 1,5Ah
Capacitate: peste 60 șocuri la energie maximă (200J) sau 6 ore de monitorizare continuă

Electrozi

Electrozi: electrozi de unică folosință Samaritan®
Amplasare: anterior – lateral (adult), anterior – posterior (pediatric)
Zonă activă cu gel: 100 cm²
Lungimea cablului: 1 m

Durata de viață a cartușului: 4 ani de la data fabricației

Data de expirare a cartușului an/lună este inscripționată pe partea din spate a cartușului și pe cutia acestuia. Dacă data de expirare este depășită cartușul trebuie înlocuit de urgență.

Notificare: Compania HeartSine recomandă păstrarea unui cartuș Pad-Pak de rezervă împreună cu aparatul. Acesta se poate păstra în partea din spate a genții de transport.

Cartușul se introduce în aparat prin glisare până se aude un clic și ambele clapete sunt complet fixate. Pentru a îndepărta cartușul se apasă cele două clapete de pe marginea acestuia și se extrage.

Cartușul este prevăzut cu o bandă verde de care se trage numai atunci când aparatul trebuie folosit pe pacient.

Produsul are marcaj CE, este inscripționat cu denumirea acestuia, datele producătorului, data de expirare și este însoțit de instrucțiuni de utilizare în limba română.